

K20100

Test tampone STANDARD COVID 19 AG TEST - SD BIOSENSOR

STANDARD COVID 19 Ag Test SD BIOSENSOR è un test rapido (30' / 30 minuti) e affidabile per il rilevamento dell'antigene del COVID 19 in tampone naso faringeo e faringeo.

STANDARD COVID 19 Ag Test SD BIOSENSOR è un test immunologico cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici per COVID 19 presenti nel rinofaringe e nell'orofaringe umani.

STANDARD COVID 19 Ag Test SD BIOSENSOR deve essere eseguito esclusivamente da operatori sanitari e laboratori come ausilio per la diagnosi precoce di un'infezione da SARSCoV-2 in pazienti con sintomi clinici di infezione da SARS-CoV-2.

STANDARD COVID 19 Ag Test SD BIOSENSOR è un test diagnostico di screening. Al fine di ottenere la conferma di Infezione da COVID 19 devono essere eseguiti successivamente metodi diagnostici alternativi più specifici.



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1. Non riutilizzare il kit.
2. Non utilizzare il kit se la custodia è danneggiata o il sigillo è rotto.
3. Non utilizzare tubi di buffer di estrazione di un altro lotto.
4. Non fumare, bere o mangiare durante la manipolazione del campione.
5. Indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti e camici da laboratorio durante la manipolazione dei reagenti del kit. Lavarsi accuratamente le mani dopo aver eseguito i test.
6. Pulire accuratamente eventuali perdite utilizzando un disinfettante appropriato.
7. Manipolare tutti i campioni come se contenessero agenti infettivi.
8. Osservare le precauzioni stabilite contro i rischi microbiologici durante tutte le procedure.
9. Smaltire tutti i campioni e i materiali utilizzati per eseguire il test come rifiuti a rischio biologico. I rifiuti chimici di laboratorio e a rischio biologico devono essere gestiti e smaltiti in conformità con tutte le normative locali, statali e nazionali.
10. L'essiccante nella busta di alluminio serve per assorbire l'umidità e impedirle di danneggiare i

prodotti. Se le perle dell'essiccante virano da giallo a verde, il dispositivo diagnostico nella custodia deve essere scartato.

CONSERVAZIONE E STABILITA'

Confezione da 25 pezzi

Conservare il kit a temperatura ambiente, 2-40 °C / 36-104 °F, lontano dalla luce solare diretta. I materiali del kit sono stabili fino alla data di scadenza stampata sulla scatola esterna. Non congelare il kit

ARTICOLO VENDUTO IN ESENZIONE IVA EX ART. 124 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 CON LA DESTINAZIONE D'USO DEL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ARTICOLO VENDUTO MOMENTANEAMENTE SOLO CON BONIFICO ANTICIPATO

Dettagli

Prodotto

Materiale:

Misura: 24.5x12x7 cm

Peso: 0,009 Kg

Minimo ordinabile: 25 pz

Multipli: 25 pz

Confezionamento

Misure cartone: 56x48x40 cm

Peso del cartone: 8 Kg

Imballo master: 750 pz

Confezione interna: 25 pz

Tipo confezione: Non confezionato

Varianti colori disponibili



Bianco